


Fiche produit ANDRO-SWITCH

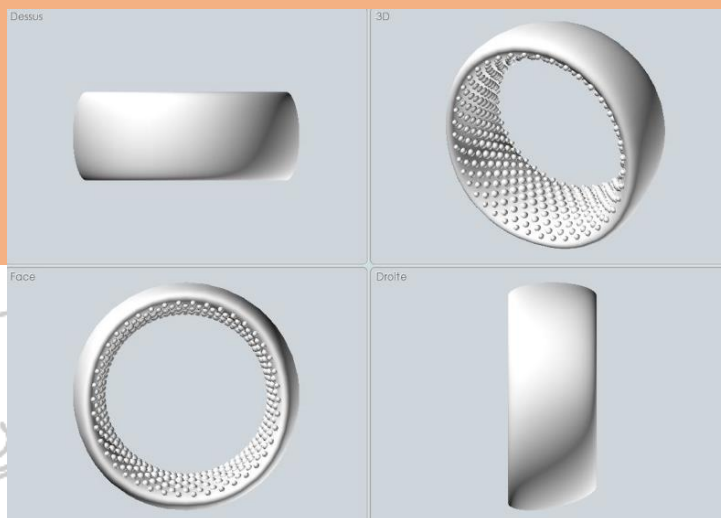

Anneau thermique : dispositif annulaire pénoscrotal de maintien testiculaire pour la mise en œuvre du protocole de contraception masculine thermique (CMT) par remontée testiculaire.

Principe	Spécialement conçu pour maintenir temporairement les testicules en position supra scrotale. L'élévation de la température des testicules à la température corporelle entraîne une infertilité temporaire et réversible.
Caractéristiques	Pratique d'une contraception masculine dite locale, non hormonale et de longue durée . Seuil contraceptif : concentration de spermatozoïdes < 1 million/ml . Efficace ; réversible ; peu ou pas d'effets secondaires ; faible coût . Effet push-up maintenant les testicules en position haute. Ergonomique, confortable, sans risque de striction du pénis. Non stérile, réutilisable, à usage individuel . 5 tailles disponibles.
Matière	Silicone souple testé cliniquement pour du contact cutané prolongé. Hypoallergénique , sans latex, colorants, BPA, phtalate, plastique, agents de blanchiment, ou toxines.
Indications	Toute personne désirant pratiquer la CMT, avec accord du médecin traitant . Il peut être utilisé dans le cadre du bien-être.
Principales complications	La CMT n'est pas un processus instantané, l'infertilité comme le retour à la fertilité demandent un délai de plusieurs mois. Aucun effet indésirable n'est survenu au cours du port de dispositif annulaire. Risque de démangeaisons (contact prolongé du dispositif et de la peau). Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort et parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Mise en place	Introduisez le pénis dans l'anneau thermique. Glissez ensuite doucement la peau du scrotum pour la faire passer totalement à l'intérieur de dispositif. Par manque de place, les testicules vont alors remonter naturellement dans la poche inguinale à la racine de la verge.

	<p>Vérifier que les testicules se trouvent dans la poche inguinale par une légère palpation.</p> <p>Peut être recouvert d'un sous-vêtement classique.</p> <p>Peut être installé ou retiré dans n'importe quelle position.</p> <p>La mise en place, le port ou le retrait du dispositif ne nécessite pas l'utilisation d'un lubrifiant.</p> <p>Vous pouvez uriner, avoir des rapports sexuels, des érections, ou encore pratiquer les gestes de la vie quotidienne et professionnelle comme à votre habitude.</p>	
<p>Hygiène & Conservation</p>	<p>Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation à l'eau tiède avec un savon doux.</p> <p>Utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau.</p>	
<p>Durée de port</p>	<p>15h quotidiennes.</p> <p>4 années consécutives.</p>	
<p>Contre-indications</p>	<p>Toute anomalie au niveau de l'aîne du pubis, de la verge, de l'aîne et des testicules ; hernie inguinale; Cancer du testicule ; Diminution de la force des mains ; obésité ; Infections cutanées locales de la zone de la verge, du scrotum, de l'aîne et du pubis ; Dermatite de contact de la zone de la verge, du scrotum, de l'aîne et du pubis ; Œdème de la verge.</p>	

- Ni la CMT, ni le port de dispositif annulaire ne permet d'offrir la moindre protection contre la transmission de maladies (MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est efficace.
- Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin traitant.
- Veillez à toujours porter le dispositif annulaire en suivant exactement les indications du protocole de la CMT et celles de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

